

Lühike kasutusjuhend

ACCU-CHEK® Active VERESUHKRU MÕÖTJA



- 1 ekraan
- 2 mälu
- 3 seaded
- 4 testribasuunaja (saab puhastamiseks eemaldada)
- 5 optiline mõõteaken
- 6 testriba pesa
- 7 patarei vahetuse pesa (tagaküljel)
- 8 kodeerimiskiibi pesa

Patareide paigaldus


Ava aparadi taga ülaosas olev patareisahtel ja eemalda kaitse liitumpatareilt. Kontrolli, et patarei "+" "pool oleks alati suunaga allapidi. Lükka patarei sahtel tagasi paika nii et oleks kuulda kergelt klõpsatust. Patarei kestab ligi 1000 mõõtmist või 1 aasta.

Kodeerimine



Kontrolli, et aparadi oleks välja lülitatud. Võta oranži värvi kodeerimiskiip ja lükka see ette-

vaatlikult aparadi vasakus küljes olevasse avasse. Kontrolli, et kodeerimiskiip oleks lõpuni lükatud,

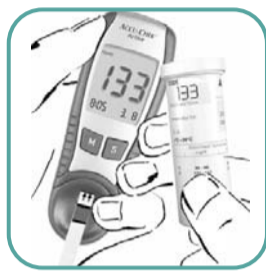

nii et oleks kuulda õrna klõpsatust. Sisesta testriba aparadi sisse-lülitamiseks. Võrdle

ekraanile ilmunud kolmekohalist numbrit testribade purgil olevaga. Need peavad olema identsed.

Veresuhkru mõõtmine



Aparaadi sisse-lülitamine. Sisestades testriba, lülitub aparadi ise automaatselt sisse ja on

mõõtmiseks valmis. Hoida testriba oranž padjake ülespidi. Ettevaatlikult lükka testriba aparadi allosas olevasse avasse 4 (vt. pildil) kuni kuuled kergelt klõpsatust.


Veredoseerimine

a. Kui ekraanile ilmub veretilga märk, pane veretilg (ca. 1-2µl on piisav kogus) oranži värvi padjakese keskele. Kui sõrmeots puudutab testriba, ei juhtu sellest midagi.



b. Veretilga asetamine testribale väljaspool glükomeetrit. Soovi korral võite siis, kui ekraanil vilgub testriba ja veretilga sümbol, võtta testriba glükomeetrist välja ning seejärel veretilga värvilisele padjale asetada. Nüüd on Teil ca. 20 sekundit aega panna veretilg

testribale ja verega kaetud testriba viia aparadi tagasi, enne kui aparadi välja lülitub.

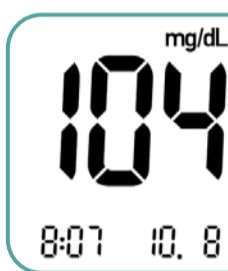

Tulemuse lugemine
Testitulemus ilmub ekraanile 5 sekundi pärast ja salvestub automaatselt

koos kellaaja ja kuupäevaga.

Visuaalne värvitus

Üks võimalus on saada tulemus võrreldes testriba tagaküljel olevat ümmargust aknakest testriba purgil olevate ümmarguste ringikestega. See võrdlus peab kindlasti toimuma 30-60 sekundi jooksul pärast vere võttu.



Mälu



ACCU-CHEK® Active salvestab automaatselt 200 viimast tulemust mälu koos kuupäeva ja kellaajaga. Aparadi sisse-

lülitamiseks ja mälu vaatamiseks vajuta M nuppu. Ekraanil on näha sõna "mem" üleval vasakus nurgas ja viimase analüüsi tulemus. Vajuta S nuppu, et liikuda mööda testitulemusi ajas tagasi.

Ekraani puhastamine



Tõmba testriba kelk vajutades enda poole ja puhasta see külma veega. Seejärel võib seda

desinfitseerida 70% alkoholiga. Pühi testriba kelgu optilised mõõtmiskomponendid pehme riidega ja/või puuvillase rätiga, mis võib olla kergelt niisutatud vee või 70% alkoholiga. Kontrolli, et kõik komponendid oleksid täiesti kuivad, enne kui lükkad testriba kelgu tagasi aparadi.

Tulemuste keskmine väärtus

Accu-Chek Active võib näidata viimase 7 või 14 päeva keskmist tulemust. Selleks tuleb minna mälu vajutades M nuppu. Seejärel tuleb vajutada nii M kui S nuppu üheaegselt. Ekraanil paremal üleval nurgas on näha sõna "7 day ave" (7 päeva keskmine tulemus). 14 päeva keskmine tulemus vaatamiseks tuleb vajutada uuesti mõlemad nupud üheaegselt alla. Vajutades S nuppu pääseb tagasi mälu.

ACCU-CHEK® Active Garantii

Aparaadil on garantii 5 (viis) aastat alates ostu kuupäevast! Iga aparadi on identifitseeritav tagaküljel olevate numbritega.

ACCU-CHEK® Active andmete allalaadimine oma arvutisse

Kui teil on soovi ja huvi laadida oma mõõtmistulemused arvutisse, saate seda teha lihtsalt ja veatult. Vajate spetsiaalset tarkvara ACCU-CHEK® Compass, millega varustab teid AS Surgitech (kontaktid leiata kasutusjuhendi lõpus).

Teostamine

Hoida Mälu nuppu all, kuni 3 sekundit. Ekraanile ilmub teade PC. Et süsteem toimiks vajate spetsiaalset riistvara (infrapuna liidese vastuvõtja). Asetage ACCU-CHEK® Active aparadi otsa infrapuna liidese vastuvõtja lähedusse.

Probleemide esinemisel võtke ühendust Roche Diagnostics esindusega. Kontaktid leiata kasutusjuhendi lõpus.


ACCU-CHEK® Active

VERESUHKRU MÕÖTJA

Lühike kasutusjuhend

Roche

Tähtsamate veateadete loetelu

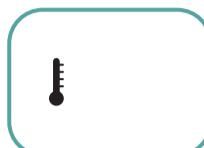

Temperatuur

Temperatuur ei ole enam piirides, mis annaks määratleda tõese tulemuse. Laske glükomeetrit ja testribadel aeglaselt soojeneda või jahtuda toatemperatuurini, kuni kujutis ekraanilt kaob. Sellel ajal määratud veresuhkru näit ei ole sobiv terapeutilisteks otsusteks, kuna tulemus võib olla ebatäpne.




Patareid on tühjaks saamas

Pärast selle märgi ilmumist ekraanile saate Te veresuhkru määrata veel umbes 50 korda. Vahetage patareid niipea kui võimalik.



Valgus on liiga ere


Valige määramiseks mõni varjulisem koht või varjake valgust oma kehaga.

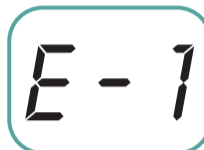

Testriba on sisestatud ebakorrektselt
Eemaldage ja sisestage testriba uuesti oranži värvi ruuduke ülespoole ja lükake lõpuni.



Kodeerimiskiip on määramise ajal liikunud
Asetage kiip avasse tagasi ja alustage määramist uue testribaga.

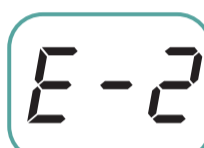


Sisestatud on vale kodeerimiskiip.
See kodeerimiskiip ei kuulu Glucotrend või Accu-Chek


Active testiribade süsteemi. Eemaldage see ja sisestage õige kodeerimiskiip



Testriba liikus määramise ajal paigast
Korrake määramist uue testribaga.

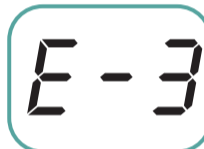


Kodeerimiskiibi lugemise viga
Eemaldage kodeerimiskiip glükomeetrist ja pange see uuesti avasse.

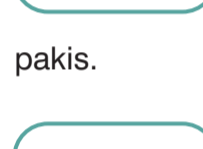

Glükomeeter on kodeerimata
Sisestage kodeerimiskiip, mis sisaldus testribade pakis.




Vere hulk testribal ei ole piisav
Pöörake testriba teistpidi ja kontrollige

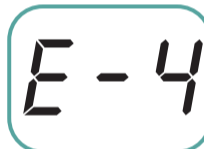

Optiline määramisaken on kas määratud või rikutud

Puhastage optiline määramisaken, nagu on kirjeldatud juhendis, ning korrake protseduuri.

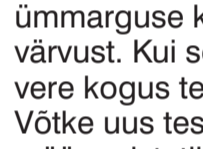

ümmarguse kontrollaknakese värvust. Kui see ei ole ühtlane, on vere kogus testribal liiga väike. Võtke uus testriba ning korrake määramist, tilgutades testribale rohkem verd.




Te olete eksikombel sisestanud eelnevalt kasutatud või määratud testriba, või siis

tilgutanud verd testribale enne veretilga sümboli vilkuma hakkamist ekraanil. Sisestage uus testriba (E-5 võib ekraanile ilmuda ka juhul, kui optiline määramisaken on määratud või katki. Vea parandamiseks vaata E-4).



Tõsine aparadi rike
Pöörduge oma kohaliku Roche Diagnostics' esindaja poole.

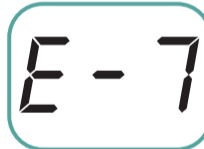

Aparadi on sattunud elektromagnetvälja.
Liikuge eemale.




Glükooosi sisaldus veres on alla 10 mg/dl (0.6 mmol/l)

NB! UUEL APARAADIL TULEB ALATI SISESTADA KUUPÄEV JA KELLAAEG. KUIDAS TOIMIDA?

1. Vajutage S klahvi.
2. Ekraanile ilmuvad vilkuvad nullid.
3. Liikuge parempoolse S klahviga vastavale numbrimärgile ja muutke seda M klahvi peale klikkides.
4. Numbrimärkide järjestus on: TUND:MINUT;KUUPÄEV:KUU

Vutlar vajalike esemete kaasaskandmiseks

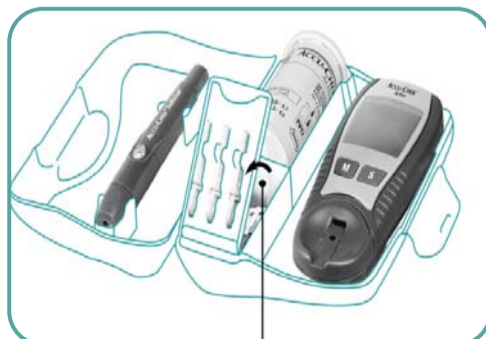

Sahtel kasutatud testiribade/lantsettide jaoks.



Kasuta ainult sooja vett vutlari puhastamiseks.

Roche

TOOTJA: Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim Germany

SurgiTech

ESINDAJA EESTIS: SURGITECH AS,
Pirita tee 20T, Tallinn 10127, Eesti
tel: 646 0660, faks: 646 0661
e-mail: surgitech@surgitech.ee
www.accu-chek.com

Accu-Chek is trademark of a member of the Roche Group