


! Käesolev lühike kasutusjuhend ei asenda põhilist Accu-Chek Go mõõturi kasutusjuhendit. Enne mõõturi kasutamist lugege kindlasti kasutusjuhendis sisalduvaid ohutusteateid. Kasutusjuhend on toodud Accu-Chek Go vereglükoosi süsteemi täieliku kasutusjuhendi 1 Osas.

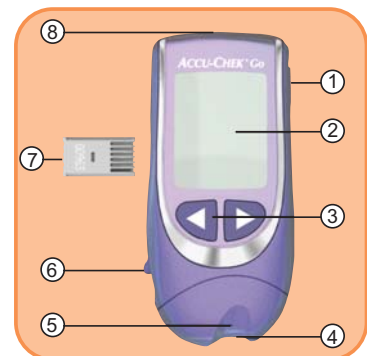

1. Nupp, sisse- ja väljalülitus, seadistamine, salvestada muutused;
2. Vedelkristall ekraan (LCD)
3. ◀ ja ▶ nupp
Seadistamine (arvuliste väärtuste vähendamine ja suurendamine), mälu, keskmised väärtused
4. Testribajuhik
5. Mõõtmisoptika kaas
6. Testriba väljutusnupp
7. Kodeerimiskiip
8. Infrapuna vastuvõtja, veresuhkru väärtuste laadimiseks arvutisse



7. Kodeerimiskiip
9. Kodeerimiskiibi ava
10. Glümeetri andmed, seeria number
11. Patareipesa kaas
12. Patarei

Kodeerimine



Kodeerimisel hoidke Accu-Chek Go mõõtur väljalülitatuna. Võrrelge kolmekohalist koodinumbrit (nt. GO 963) koodikiibil ja kasutusele võetud testribade konteineri sildil. Viimast kolm numbrit koodikiibil peavad ühtima viimase kolme numbriga testribade konteineri sildil (vt. pilti).

Võtke testribade konteineri alla kinnitatud kodeerimiskiip ja lükake see mõõturi küljel olevasse pilusse. Kontrollige, et kodeerimiskiip kinnistus klõpsates. Kui Te sooritate oma esimest vereglükoosi testi uue koodikiibiga (ja uute testribadega) kontrollige, et mõõturi ekraanil näidatud koodinumber oleks sama, mis kasutusele võetud testribade konteineril.



Vereglükoosi testimine



Mõõturi sisselülitamine.


Võtke välja testriba testribade konteinerist. Hoidke testriba noolega ülespoole. Riba painutamata lükake see õrnalt Accu-Chek Go mõõturi testriba-juhikusse, ribal märgitud noolte suunas, kuni tunnete, et see kinnistus. Testriba sisestamine lülitab mõõturi automaatselt sisse (Vt. pilti).

Järgnevalt ilmub ekraanile kodeerimise number (963 pildil on näidis). Kontrollige, et mõõturi ekraanil olev number oleks sama, mis testriba purgil.




Vere kandmine testribale.

Testriba ja vilkuva veretilga sümbolid tuletavad meelde, et tuleks kanda veretilk testribale (90 sekundi jooksul). Kandke veretilk viivitamata testribale. Accu-Chek Go mõõtur annab lühikese signaali (kui helisignaali funktsioon on sisse lülitatud) teatamaks, et testribale sattus piisav verekogus.

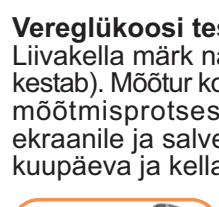

Vereglükoosi testitulemuste lugemine.

Liivakella märk näitab, et mõõtmisprotsess on alanud (ja kestab). Mõõtur kordab signaali 5 sekundi pärast teatamaks mõõtmisprotsessi lõppemisest. Testitulemus kuvab ekraanile ja salvestub automaatselt mõõturi mälus koos kuupäeva ja kellaajaga.

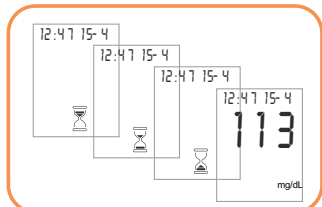

Testiriba hävitamine.

Hoidke mõõtur otse prügikasti kohal. Eemaldage mõõturist testiriba lükates testiriba väljutusnuppu kiirelt endast eemale, nii kaugelt kui võimalik (testiribajuhiku suunas). Hoidke testiriba väljutusnuppu samas positsioonis nii kaua, kuni testiriba kukub välja. Testiriba väljastusega lülitub mõõtur automaatselt välja. Kasutatud testiriba võite ära visata koos tavalise majapidamisprügiga.

Mälu



Testitulemuste vaatamine. Accu-Chek Go mõõtur on varustatud 300-kohalise mälu testitulemuste salvestamiseks koos kuupäeva ja kellaajaga. Ekraani sisselülitamiseks ning testitulemuste vaatamiseks vajutage korraks ◀ või ▶, ekraani keskel näete viimast salvestatud testitulemust. Vajutades ◀ või ▶ nuppe, saate liikuda mälu edasi-tagasi. Igal ajal on võimalik mälust väljuda, kasutades Ⓞ nuppu. Glükomeeter lülitab ennast välja.

7, 14 ja 30 päeva keskmiste vaatamine. Glükomeeter võimaldab vaadata viimase 7, 14 ja 30 päeva keskmisi veresuhkru väärtusi. Ekraani sisselülitamiseks ning testitulemuste vaatamiseks vajutage korraks ◀ või ▶. Glükomeeter lülitab ennast sisse. Ekraanil näete viimast testi tulemust, koos aja, kuupäeva ja mem sümboliga. Vajutades ▶ nuppu, ilmub ekraanile viimase 7 päeva keskmine veresuhkru väärtus. Vajutades veel ▶ nuppu, saate liikuda edasi ning näete 14 ja 30 päeva keskmisi tulemusi. Igal ajal on võimalik mälust väljuda, kasutades Ⓞ nuppu. Glükomeeter lülitab ennast välja.

Puhastamine



Kergitage mõõtmisoptika kaant paremast nurgast (koht, mis on märgitud noolega) vabastamaks kinnitusmehhanismi. Lükake kaas ülespoole selle paremast nurgast. Puhastage mõõtmisoptikat veidi niisutatud (külm vesi või alla 70% alkoholilahus) puuvillase vatitupsuga. Asetage mõõtmisoptika kaas algsesse asendisse. Kaas klõpsab kergelt kohale.



Tähtsamate veateadete kirjeldus

E-1 (Vilkuva testiriba märgiga). Testriba on sisestatud valesti või mitte lõpuni. Seda painutamata lükake testiriba õrnalt testiriba-juhikusse noolte suunas, kuni see kinnistub mõõturisse.

E-7 Testiriba liigutati testimisajal. Korrake mõõtmist uue testiribaga. Või: veri või kontroll-lahus oli kantud testribale liiga vara. Enne vere või kontroll-lahuse kandmist oodake, kuni ekraanile ilmub testiriba ja vilkuva veretilga märk.

E-2 (Vilkuva "code" märgiga). Sisestatud vale koodikiip. Koodikiip ei kuulu kasutuselolevate testiribade komplekti. Eemaldage koodikiip.

E-8 (Vilkuva "code" märgiga). Koodikiip oli eemaldatud peale vere kandmist testribale, on vigane või mõõturisse valesti sisestatud. Eemaldage koodikiip ja sisestage uuesti.

E-3 (Vilkuva "code" märgiga). Koodikiip ei ole loetav. Eemaldage koodikiip ja sisestage see uuesti. Koodikiipi ja testiribasid ei saa kasutada, kui veateade ilmub uuesti. Või: Sisestatud on vale koodikiip. Koodikiip ei kuulu kasutuselolevate testiribade komplekti. Eemaldage koodikiip.

E-9 (Vilkuva testiriba märgiga). Testiriba liigutati testimise ajal või verekogus oli ebapiisav. Korrake mõõtmist uue testiribaga.

E-4 Mõõtmisoptika viga. Mõõtmisoptika on määratud või olete sisestanud juba kasutatud või aegunud testiriba. Puhastage mõõtmisoptika (Peatükk 6.1). Või: veri või kontroll-lahus oli kantud testribale liiga vara. Enne vere või kontroll-lahuse kandmist oodake, kuni ekraanile ilmub testiriba ja vilkuva veretilga märk. Kui veateade esineb tihti või pidevalt, on mõõtur vigane. Pöörduge klienditeenindus-keskusesse.

--- (Vilkuva "code" märgiga). Koodikiip on vigane või sisestamata. Sisestage koodikiip.

EEE Lülitage mõõtur välja ja korrake testi uuesti. Kui veateade jääb alles, on mõõtur vigane ja seda ei saa enam kasutada. Pöörduge lähimasse klienditeeninduskeskusesse.

E-5 (Vilkuva testiribaga). Mõõtmisoptika on määratud või vigane. Puhastage mõõtmisoptika (Peatükk 6.1). Testiriba oli mõõturis peale testimist liiga kaua (kauem, kui 90 sekundit). Kui teete järgmist testi, eemaldage testiriba koheselt. Kui veateade esineb tihti või pidevalt, on mõõtur vigane. Pöörduge klienditeenindus-keskusesse.

LLL Välis- või mõõturi temperatuur on väljaspool lubatud piire. Tõstke mõõtur toatemperatuuriga ruumi ja oodake, kuni see kohaneb ja veateade kaob ekraanilt.

LO Vereglükoosi tulemus on alla lubatud piirväärtuse (0.6 mmol/L).

HI Vereglükoosi tulemus on kõrgem lubatud piirväärtusest (33.3 mmol/L).

E-6 (Vilkuva testiriba/tilga märgiga). Vere kogus oli ebapiisav. Korrake mõõtmist uue testiribaga.


Selline teade esineb...



- Testimisrežiimis
- Koos testitulemusega (test ja mälu)



- Kõikides töörežiimides

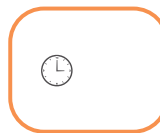

- Kõikides töörežiimides

...ja tähendab:

Välitemperatuur on/oli testimise ajal lubatud väärtuste piiril. Sellist testitulemust ei tohi kasutada raviotsustuste tegemisel.

Peale sümboli esmakordset esinemist võite sooritada veel umbes 50 testi. Vahetage patarei esimesel võimalusel.

Kasutuselolevate testiribade säilivusaeg on ületatud. Võtke kasutusele uued testiribad ja vahetage koodikiip. Kontrollige kellaaja- ja kuupäeva näite.

ACCUCHEK, GLUCOTREND ja SOFTCLIX on Roche Grupi liikmete kaubamärgid.

Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim, Saksamaa

ESINDAJA EESTIS: SURGITECH AS, Pirita tee 20T, Tallinn 10127, tel:6460660, faks: 6460661, surgitech@surgitech.ee