


ACCU-CHEK® Smart Pix

Lihtne kasutada-abistav tugi diabeedi ravis



A




Ettevalmistus 1

Pista Accu-Chek Smart Pixi USB otsik arvuti vabasse USB auku. Pole oluline, kas arvuti on sisse lülitatud või mitte.

Accu-Chek Smart Pix seade on ühendatud elektriga nii et ta ei vaja eraldi patareisid

2

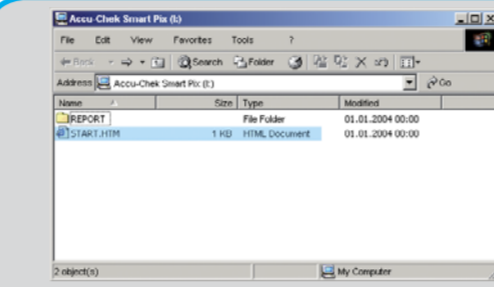

Topelt klikk Smart Pixil ja ekraanile ilmuvad failid REPORT ja START.HTM. Avada fail START.HTM topelt klikiga.

3




Asetada aparaat infrapuna-liidesed vastakuti 10 cm kaugusel oleva Accu-Chek Smart Pix seadmega.

Nüüd tuleb valida sobiv aparaat ja järgida juhendeid andmete edastamiseks.


B

Allalaadimine 4




Accu-Chek Active

- Hoida glükomeetri M-nuppu vähemalt 3 sekundit all
- Ekraanile ilmuvad tähed PC ja andmete edastamine algab koheselt




Accu-Chek Go

- Hoida glükomeetri M-nuppu vähemalt 3 sekundit all
- Ekraanile ilmuvad tähed PC ja andmete edastamine algab koheselt



Accu-Chek Go


- Hoida all nuppe ◀ ja Ⓞ
- Ekraanile ilmuvad tähed PC ja andmete edastamine algab koheselt



Accu-Chek Spirit

- Kontrolli, et Accu-Chek Spirit insuliinipump oleks STOP asendis
- Valida Ⓞ nupu abil funktsioon ``Data Communication``.
- Kinnitada Ⓞ nupuga. Sisseehitatud infrapuna-liides on nüüd aktiveeritud ja andmete edastamine algab koheselt.


C



Tulemused 5

Kui andmed on edastatud, valmistab Accu-Chek Smart Pix süsteem raportid ette. Ekraanil on sel ajal näha kahte kriipsukest.

6

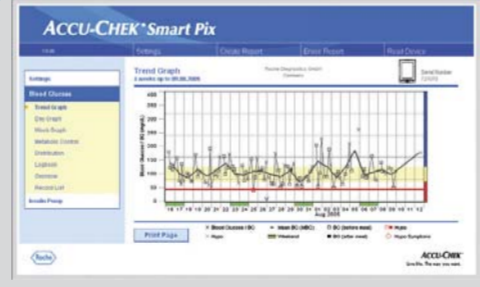

Accu-Chek Smart Pix süsteem loob raportid mitmete graafikute ja statistiliste analüüsidega. Kõik raporti elemendid on kogu aeg ekraanil kättesaadavad.

Väljaprintimiseks võib soovitud raportid erinevate graafikute ja statistiliste analüüsidega välja valida.



ACCU-CHEK®
Live life. The way you want.