

Kasutamishüend

ACCU-CHEK® SOFTCLIX 2

Softclix on kergelt kasutatav skarifikaator, mis on spetsiaalselt arendatud saavutamaks peaaegu valutut torget kapillaarvere saamiseks sõrmeotsast või kõrvanibust. Torkesügavus on täpselt reguleeritav vastavalt individuaalsetele naha omadustele.

Ohutusviited

Kasutage Softclix'i ainult koos SoftclixII lantsettidega, sest vastasel juhul võib skarifikaator funktsioneerimise lõpetada.

⚠ **Softclix on mõeldud patsientide enesekontrolliks. Infektsiooniohu tõttu ei tohi ühte lantsetti kasutada rohkem kui üks inimene.**

Puhastamine ja desinfektsioon

Puhastage Softclix'i kord nädalas vee või 70% etüülalkoholiga (saadaval apteekides) niisutatud rätikuga. Järgnevalt laske Softclix'il põhjalikult kuivada.

⚠ **Ärge kunagi pistke Softclix'i vette ega alkoholi.**

Sümbolite seletus

- ⚠ Seda viidet palume eriti austada. Ühekordseks kasutamiseks.
- ② Ühekordseks kasutamiseks.
- 🗑️ Lantsette tohib ainult trükitud kuupäevani kasutada.
- LOT Loti number.
- STERILE Lantsette on steriliseeritud vähemalt 25 kGy.
- € See toode vastab 93/42/EEC 14. juuni 1993 meditsiinitoodete nõuetele.

Garantii

Roche Diagnostics annab Softclix'ile garantii üheks aastaks alates ostukuupäevast. Meie vastutus on otseselt limiteeritud tõestatud tootmisdefektidega.

Garantii loetakse kehtetuks, kui seadet on sobimatult käsitletud. Probleemide tekkimisel palun pöörduge meie teeninduspunktide poole.

Patent

EP-B 0565970, US Re 35803, Saksa Disain: DE 49900488.4
Roche Diagnostics on USA-s ja mitmetes teistes riikides patenteerinud Softclix skarifikaatori ja selle

kasutamise koos SoftclixII lantsettidega. Ostes meie tooteid, olete te õigustatud kasutama Softclix skarifikaatorit üksnes SoftclixII lantsettidega.

Kaubavormid

SoftclixII lantsetid, 200 lantsetti, art. nr. 1623460

Kaubamärk

Accu-Chek ja Softclix on Roche Group'i liikmete kaubamärgid.

ACCU-CHEK® SOFTCLIX 2

SKARIFIKAATOR

Kasutamishüend



Lantsettide paigaldamine või vahetamine

Esiteks tõmmake ära Softclix'i ots. Kui lantsett on juba olemas, tõmmake selle eemaldamiseks väljaviskajat ettepoole. Kasutatud lantsett visake minema.

⚠ **Kõrvaldage kasutatud lantsette ettevaatlikult, et ei tekiks vigastusi.**

Asetage uus lantsett lantsetihoidjasse kuni käib plöksatus. Keerake kaitseots lantseti otsast ära. Asetage Softclix'i ots uuesti tagasi kuni käib plöksatus. Seejuures peab positsioneerimispunkt vabaksjätetud poolkuu-kujulise koha keskele asetuma.

Ettevalmistused verevõtmiseks

Kõige paremini saab verd võtta kas näpuotsast või kõrvanibust. Meie soovime seda teha näpuotsa küljepoolsest, kuna see on kõige valutum. Peske käed

sooja veega ja kuivatage korralikult. See aitab tagada nõutud hügieenitaset ja stimuleerib ühtlasi ka vereringlust.

Torkesügavuse valik

Modernsed glükomeetrid vajavad mõõtmiseks väga vähe verd. Enamasti piisab väikseimast torkesügavusest. Seega väheneb ka valu

torkamisel ja pärast torkamist ning armi ei jää peaaegu nähagi. Torkesügavust saab muuta skarifikaatori otsa keerates.

Verevõtmine

Kõigepealt kontrollige, kas torkesügavus on teile sobiv. Seejärel vajutage skarifikaatori vastasotsas olevat nuppu seadme laadimiseks (laadimisnuppu) kuni käib plöksatus.

Samaaegselt ei tohi vajutada vajutusnuppu. Skarifikaator on laetud, kui vajutusnupul on näha kollast värvust. Asetage seade õrna vajutusega soovitud torkekohale ja vajutage vajutusnuppu. Samaaegselt ei tohi vajutada ega blokeerida laadimisnuppu. Masseerige õrnalt näpuotsa või kõrvanibu, et veri ilmuks

nähtavale. Kui verd ei tulnud piisavalt, proovige suuremaid torkesügavusi. Nüüd võite te mõõta veresuhkru sisaldust vastavalt teie glükomeetri või testribade kasutamise juhendile.

⚠ **Infektsiooni vältimiseks kasutage igal verevõtmise korral uut lantsetti, siis on ka valu väiksem. Ärge laadige Softclix'i enne kui te olete valmis verd võtma. Ärge kunagi jätke Softclix'i ekstreemsetesse temperatuuridesse (nt. kuuma autosse).**

Torkekoha järelkäsitlus

Pühkige torkekoht kuiva puhta paberrätikuga ja hoidke haav puhtana.



Tootja: Roche Diagnostics GmbH Patient Care
D-68298 Mannheim, Germany.



Roche Diagnostics® ametlik esindaja Eestis on
Surgitech AS
Pirita tee 20T, Tallinn 10127
tel:6460660 Fax:6460661
e-post:surgitech@surgitech