

Softclix является легко используемым скарификатором, который был изобретён специально для практически неощутимого укола из кончика пальца или мочки уха. Глубина укола точно отрегулирована соответственно индивидуальным свойствам кожи.

Предупреждение:

Используйте Softclix только вместе с Softclix ланцетами. В противном случае скарификатор может перестать работать.

⚠ Softclix создан для пациентов в целях самоконтроля. Во избежание занесения инфекции нельзя, чтобы ланцет был использован более чем одним человеком.

Чистка и дезинфекция:

Прочистите Softclix салфеткой, пропитанной 70% этилалкоголем (можно приобрести в аптеках). Затем дайте прибору тщательно высохнуть. Процедуру достаточно делать один раз в неделю.

⚠ Никогда не опускайте Softclix в воду или в алкоголь.

Пояснение символов:

⚠ на эту фразу просим обратить особое внимание
② предназначено для одноразового использования
🗓 ланцеты можно использовать только до обозначенной даты
LOT номер партии
STERILE ланцеты стерилизовались минимально 25 kGy
CE эта продукция соответствует медицинским требованиям нр 93/42 ЕЕС, принятым 14. июня 1993 года.

Гарантия:

Roche Diagnostics даёт скарификатору гарантию сроком в один год с момента покупки прибора. Наша ответственность лимитирована в соответствии с доказанными дефектами производства.

Гарантия становится недействительной при неправильном использовании продукции. При возникновении проблем в использовании пожалуйста обратитесь в наш пункт обслуживания.

Патент:

EP-B 0565970, US Re 35803, под номером DE 4990488.4. Roche Diagnostics запатентовало в США и в других странах скарификатор и его использование с Softclix 2 ланцетами.

Купив нашу продукцию, вы получаете право на использование скарификатора только вместе с Softclix 2 ланцетами.

Маркировка товара:

Accu-Chek и Softclix являются членами Roche Group.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОКОЛА ПАЛЬЦА

Инструкция пользователя



Roche

Вставка или замена ланцета:

Снимите колпачок скарификатора. Если в устройстве находится ланцет, то Вам придётся отодвинуть выталкиватель вперёд (от себя) и таким образом удалить ланцет. Вставьте новый ланцет в специально предназначенный для этого держатель и толкайте до тех пор, пока Вы не услышите

щелчок. Вращающимся движением удалите защитный колпачок с ланцета. Нажимайте на колпачок скарификатора до возникновения щелчка. Удостоверьтесь, чтобы уровень, на котором находится колпачок, сравнялся с центром полукругового выреза на выталкивателе.

Подготовка к взятию крови:

Лучшее место для взятия крови – это подушечка пальца или мочка уха. Мы рекомендуем использовать боковую часть кончика пальца, так как сам процесс получения крови будет

наиболее безболезненным. Вымойте руки тёплой водой и тщательно просушите. Это своего рода правило гигиены и заодно помогает стимулировать приток крови.

Выбор глубины прокола с помощью вращающегося колпачка:

Современным глюкометрам для дачи результата вполне хватает небольшой капли крови. Как правило, достаточное количество крови можно получить и при неглубоком уколе, что в свою очередь снижает чувство боли от прокалывания кожи, и после этого не остаётся никакого даже самого незначительного рубца.

Глубина проникновения регулируется при помощи вращающегося колпачка. Если Вы используете устройство Softclix впервые, установите вращающийся колпачок на позицию 3 (самый глубокий укол производится при использовании позиции 5,5).

Получение крови:

Во-первых, проверьте, что вы установили колпачок на нужное деление, отвечающее за глубину проникновения. Нажимайте на кнопку заправки до тех пор, пока не услышите щелчок. Будьте внимательны и следите за тем, чтобы не нажать одновременно на кнопку отпуска. Прибор готов к эксплуатации, когда появится жёлтая точка в прозрачной кнопке выпуска. Лёгким движением прижмите Softclix напротив подушечки пальца и нажмите на кнопку выпуска. При этом надо быть предельно внимательным, чтобы не нажать на кнопку заправки или не припятствовать её свободному движению. Слегка помассируйте кончик пальца или мочку уха, чтобы легче получить кровь. Если вы

не получите достаточно крови, попытайтесь ещё раз, при этом Вам необходимо будет установить вращающийся колпачок на другое деление (например 4 или 5). Измеряйте уровень глюкозы в крови в соответствии с инструкциями, которые входят в комплект глюкометра. ! Чтобы избежать инфекции, используйте новый ланцет каждый раз, когда берёте кровь. Использование ланцета единожды помогает предотвратить болевые ощущения, которые могут возникнуть при взятии крови. Пользуйтесь устройством Softclix только в том случае, если Вы полностью готовы к взятию крови. Не пользуйтесь скарификатором в экстремальных температурах (например, в сильно нагретой машине).

Уход за местом для укола после взятия крови:

Протрите место прокола салфеткой, чтобы ранка оставалась чистой.



Представительство компании
«Roche Diagnostics GmbH» в Эстонии:



АО Сургитех
Пирита тээ 20Т, Таллинн 10127
Тел: 646 0662; Факс: 646 0661